

# Desinfecto Spray

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel,  
ohne Aldehyd, Farb- oder Duftstoffe



## Beschreibung

- Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel ohne Aldehyde, Farb- und Duftstoffe
- Muss nicht abgespült werden und trocknet schnell und rückstandslos.
- Wirkt innerhalb von 30 Sekunden gegen Grippeviren, Coronaviren (Covid-19) und Influenza, Bakterien, Mykobakterien und Pilze.
- Ideal für kleine Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheit, MedTech, Gemeinschaftseinrichtungen und Industrie.

## Eigenschaften

### Zusammensetzung :

- Ethyl- und Isopropylalkohol, Feuchtigkeitsspender und Verdickungsmittel, entmineralisiertes Wasser.

Bei einer Konzentration von 100% wirkt das reine DESINFECTO SPRAY auf :

- Standardbakterien, einschließlich Salmonellen, Listerien und Campylobacter, 30 Sekunden Kontaktzeit.
- Mykobakterien, 60 Sekunden Kontaktzeit.
- Hefepilze, Candida, 30 Sekunden Kontaktzeit.
- Viren, 30 Sekunden Kontaktzeit.

## Technische Daten

Verpackung : Flasche 250 ml / Karton 12 x 1 l / Bidon 10 l

## Gebrauchsanweisung

### Empfohlene Dosierung :

- Gebrauchsfertig
- Das Produkt unverdünnt aufsprühen, bis alle Oberflächen, Gegenstände und Materialien vollständig benetzt sind.

### Empfohlene Verwendung :

- Wegen seiner Entflammbarkeit sollten nur kleine Flächen behandelt werden.
- Die behandelten Flächen müssen während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben.
- Einwirkzeit von mindestens 2 Minuten einhalten.
- Rekontaminationen der Oberflächen vermeiden.



## Standards & Sicherheit

- Entflammbares Produkt.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Entzündungsquellen fernhalten.
- Nicht rauchen.
- Reizt auf offenen Wunden.
- Biologische Abbaubarkeit: >90% innerhalb von 28 Tagen - EWG-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden.



# GERTSCH & CO AG

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Die Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, ohne Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für eine fehlerhafte Anwendung.

## Informationen

[www.gertschag.ch](http://www.gertschag.ch)  
Großhandel für professionelle Reinigungssysteme

## Kontakt

+44 44 817 60 00  
[info@gertschag.ch](mailto:info@gertschag.ch)  
Route de Porrentruy 74, 2800 Delémont